

Gebrauchsanweisung

Anhalt Blutdruckmessgerät Aneroid inklusive Stethoskop

Art.-Nr. 99601 PZN: 18000383



Lesen Sie vor Anwendung diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.

Vorbereitung:

Beim Messvorgang entspannt und bequem sitzen, Arm nicht bewegen. Nur auf unbedeckten Arm messen. Die Manschette muss vor dem Anlegen vollständig entlüftet sein. Sie wird mit ihrem unteren Rand etwa 2 cm über der Ellenbogenbeuge um den linken freigelegten Oberarm in Herzhöhe fest (nicht zu fest) angelegt. Anschließend wird das freie Ende der Manschette mit dem Klettverschluss fest verschlossen.

Aufpumpen der Manschette:

Schließen Sie das Luftventil am Gebläseball durch Drehen im Uhrzeigersinn. Durch Drücken des Gebläseballs wird die Manschette aufgepumpt. Der Zeiger des Gerätes steigt und zeigt den jeweiligen Druck in der Manschette an. Pumpen Sie bis zu einem Wert, der 20-30 mmHg über dem zu erwartenden oberen Blutdruckwert liegt. Falls Sie den oberen Blutdruckwert nicht kennen, pumpen Sie bis 200 mmHg auf. Platzieren Sie das Stethoskop in der Ellenbeuge.

Systolischer Blutdruckwert – oberer Messwert

Öffnen Sie langsam das Luftventil, indem Sie die Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehen. Empfohlen wird eine Ablassrate von 2-3 mmHg pro Sekunde. Beobachten Sie den langsam fallenden Zeiger. Sobald ein Klopfen hörbar im Stethoskop einsetzt, lesen Sie den oberen (systolischen) Wert am Manometer ab.

Diasystolischer Blutdruckwert – unterer Messwert

Es folgen mehrere in der Intensität nachlassende Klopföne. Der letzte noch hörbare Ton gibt den unteren (diastolischen) Wert an. Entleeren Sie die Manschette vollständig und nehmen Sie sie ab.

Wichtige Hinweise

Das Gerät auf keinen Fall über 300mmHg aufpumpen! Die Messzeit sollte 2 Minuten nicht überschreiten. Wiederholungsmessung frühestens nach 2 Minuten vornehmen. Gerät vor Erschütterung, Schmutz und Nässe bewahren. Aufbewahrungstemperatur: -20°C bis +70°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 85%.

Pflege:

Manometer, Klettverschluss und Schlauch mit einem feuchten Tuch säubern. Die Manschette kann wenn nötig mit Seife und kaltem Wasser abgewaschen und luftgetrocknet werden.



Wuxi Exanovo Medical Instrument Co Ltd. , No. 42 Xixin Road, Zhangjing Xibei Town, Wuxi City,
214194 Jiangsu, China

EC REP Lotus NL B.V. Koningin Julianeplein 10, 1e verd., 2595AA The Hague, Netherlands

Vertrieb: Anhalt GmbH, Willy-Brandt-Ring 12, DE-67592 Flörsheim-Dalsheim, Germany